


Diani Release 1.16 – Seznam viditelných změn

Profil uživatele:

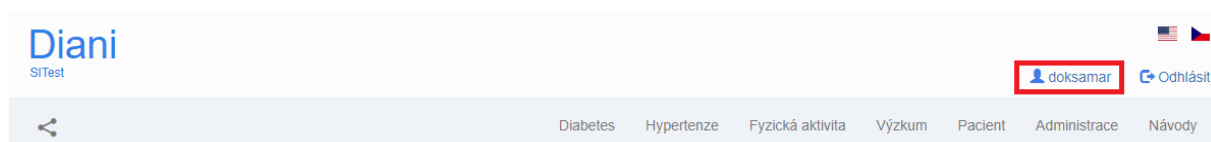

1. Přidány registrační informace.

Registrační informace

Přihlašovací jméno:	doksamar
Emailová adresa:	doksanskym@gmail.com


2. Přidáno UI pro změnu přesměrování po přihlášení.

Výchozí přesměrování

Přehled grafů diabetes ▼ Uložit


(New) AGP (Ambulatory Glucose Profile):

- Menu -> Diabetes -> AGP
- GUI stejné jako u hypertenzního záznamníku.

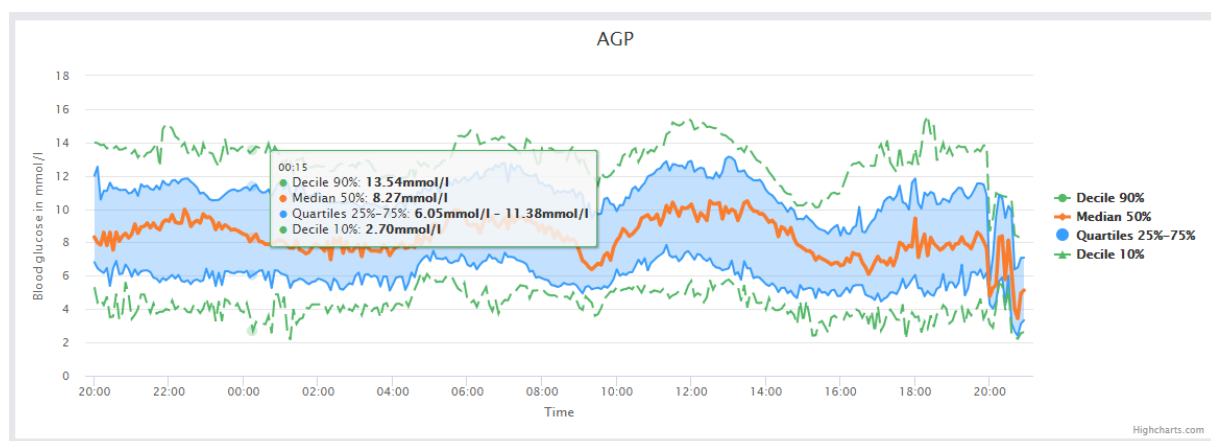


Glykemické profily

1. Změna generovaného časového rozpětí z 22 – 22 na 00 – 00.

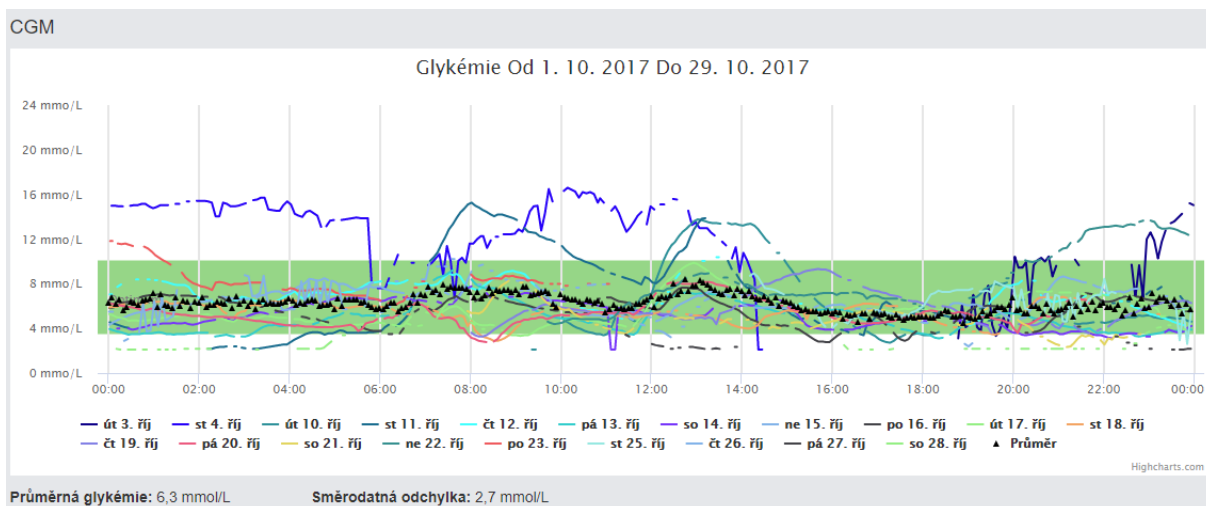

2. Změna způsobu zobrazení dat v grafu SMBG. Všechny značky jsou nově stejné obarvené podle dne v týdnu. Hodnoty se stejným datumem jsou po najetí na jeden z bodů propojeny čarou.

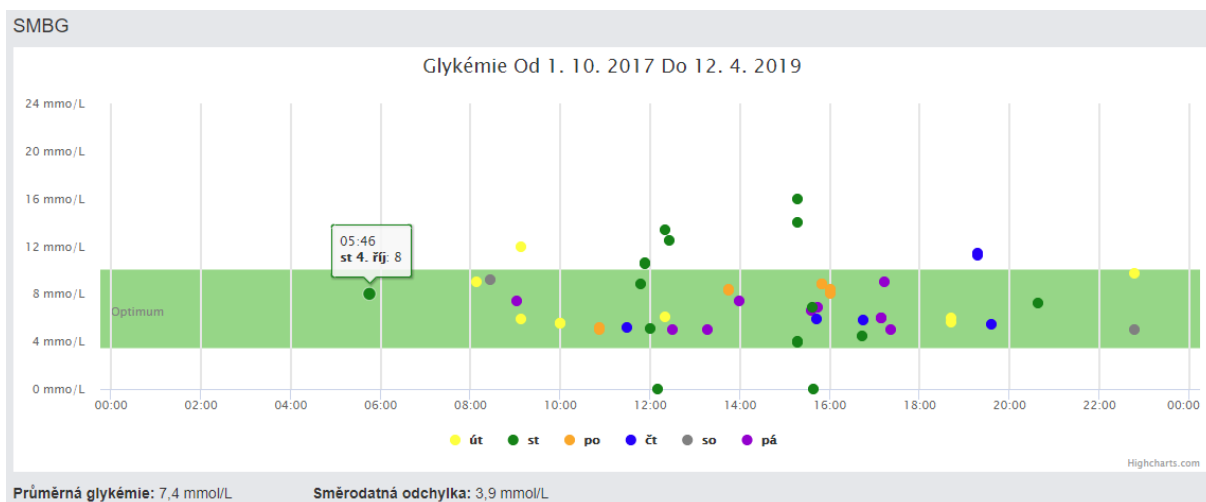

Analýza pohybu

1. Změna rozvržení GUI.

Analýza pohybu

Vybraný pacient: Doksanský Marek ▾

Práh kroků [kroků/5 min]: 100 1500

Pokles glykémie [mmol/l]: 0,1 20

Časový interval [min]: 10 60

Čas: 04.04.2019  12.04.2019 

Pokles pod hranici hypoglykémie ☐

Hledej

Datum incidentu	Odkaz do grafu	Souhrnné informace o segmentu
-----------------	----------------	-------------------------------


Analýza jídla

1. Změna rozvržení GUI.

[illegible]


Přehled grafů diabetes

1. CGM extrémní (neměřitelné) hodnoty označeny čárkovanou čarou.

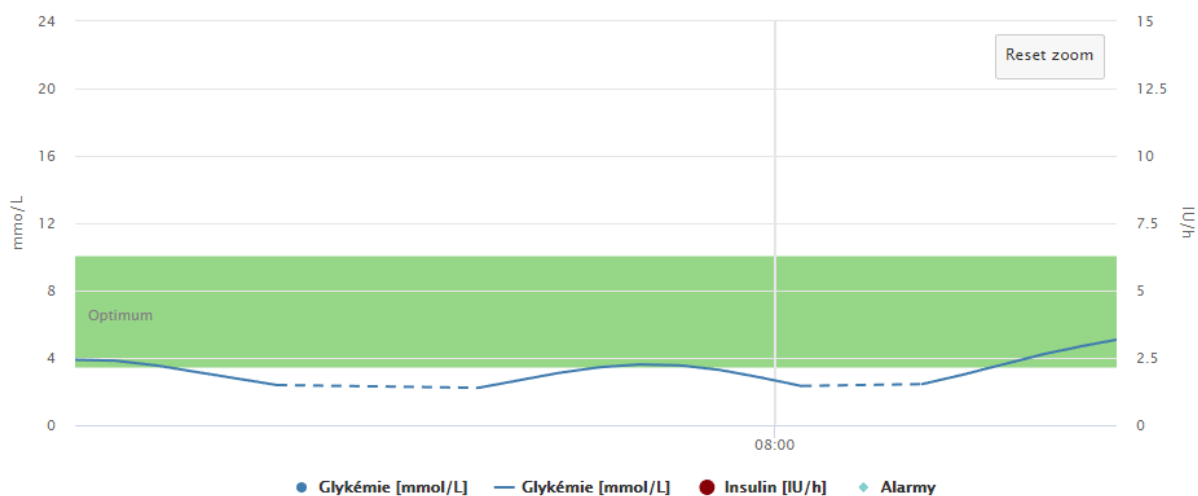


Přehled grafů hypertenze

1. Denní profil – přidáno propojení naměřených hodnot křivkou.
2. Denní profil – přidána značka pro nejnižší průměrné měření tlaku od první medikace.
3. Denní profil – přidány značky braní léků.

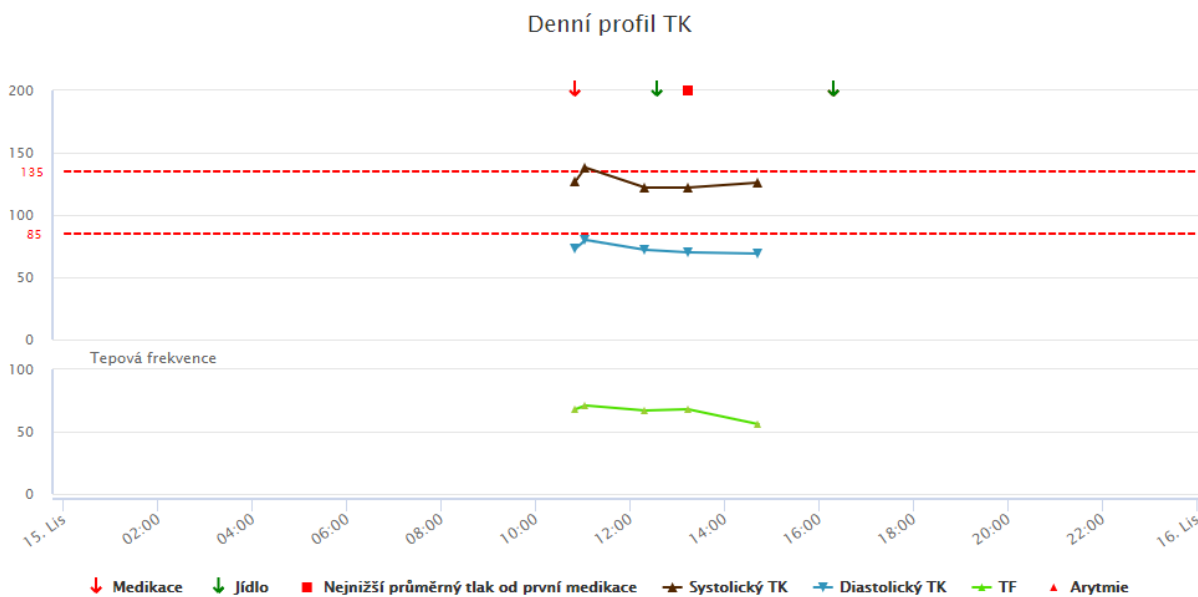

4. Přidána značka pro konzumace jídla zadaných přes Deník událostí.

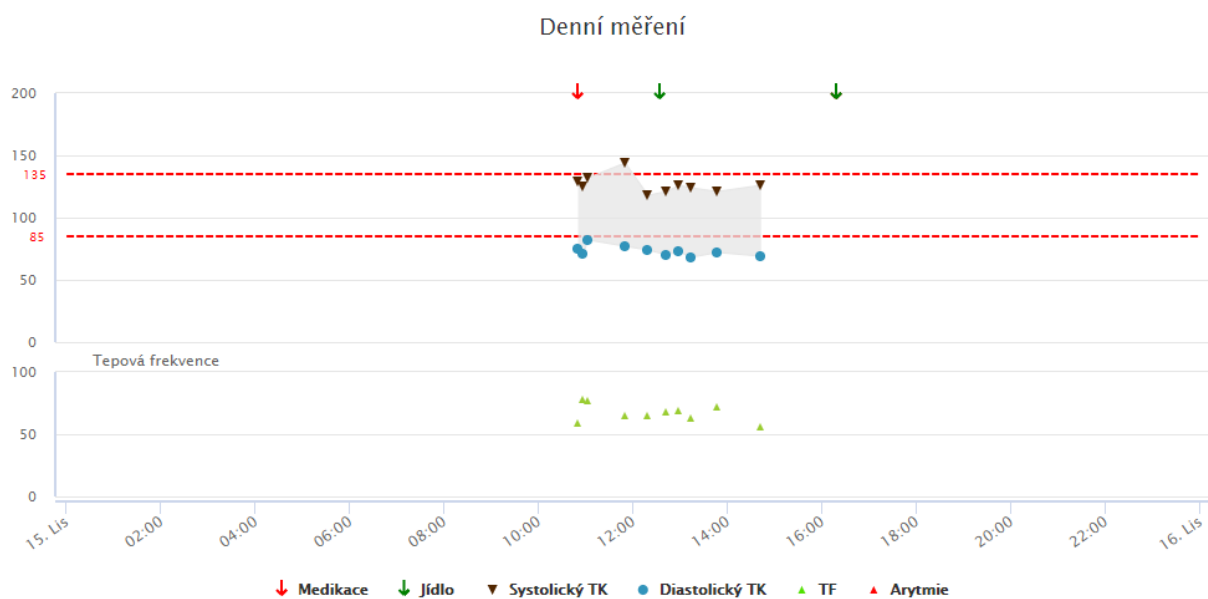

Hypertenzní záznamník

1. Export do pdf – přidáno předvyplnění léků dle aktuálně naposledy užívaných léčiv uvedených v deníku událostí.

Specifikace léků


Léky:

testovací medikace

(Léky ve formátu např. Tritace 2,5 [mg] 1-0-10 tab)

Odeslat

2. Skrytí možnosti zobrazení grafu průměrných profilů.

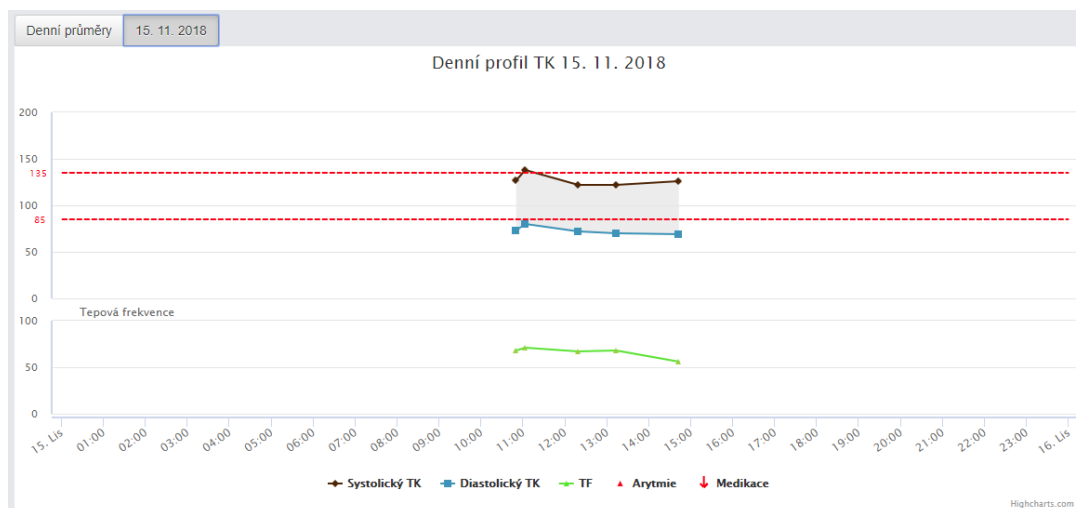

Pohyb při měření

1. Přidána legenda.

Time	STK	DTK	HR	Arrhythmia	Activity	Steps
8. 4. 2019 06:23	103	66	64	No	0	0

Legenda

aktivita Intenzita aktivity naměřená z Xiaomi. Zobrazuje se jako průměr z intervalu 5 min před měřením krevního tlaku.

kroky Součet kroků z intervalu 5 min před měřením krevního tlaku. Pokud je součet kroků 0, zobrazí se tak pouze v případě, že došlo v intervalu 15 min před, nebo po měření krevního tlaku k záznamu tepové frekvence. V opačném případě se nezobrazí nic.

Deník událostí

1. Přidána možnost vkládat konzumace jídel.

23.11.2018

Typ:

☐ Poznámka

☐ Obtíže

☐ Medikace

☒ Jídlo

Čas:

14:14

Hodnota:

Uložit

Zavřít

Dotazníky

1. Přidáno vyhodnocení nového typu dotazníků: Dotazník ranních a večerních typů.
2. Změna GUI výsledků dotazníků.
3. Přidána možnost zobrazení legendy k výsledkům, dle vyplnění pole PhysicalQuantity Description.

Výsledek pro MBTI Čakrt Czech 1.0

Jméno pacienta: **Doksanský Marek**

Vytvořen: 26. 3. 2019 10:36

MBTI Extravert	41 %
MBTI Intravert	59 %
MBTI Sensing	32 %
MBTI Intuition	68 %
MBTI Thinking	31 %
MBTI Feeling	69 %
MBTI Judging	38 %
MBTI Perceiving	62 %

[Zobrazit odpovědi](#)

[Vyplnit nový dotazník](#)

(New) Chat

Menu -> Výzkum -> Chat

Chat

Technická podpora

Doksanský Marek

15:27

Akotia Devang

anna.registrace

Bykovskaia karina

Caithaml arytmie

David Doktor

Demoboard Hypertenze 1

Demoboard Hypertenze 2

Fiala Dominik

Doksanský Marek

test

12:23 | 19. března

test2

12:23 | 19. března

test3

12:23 | 19. března

?

8:50 | 21. března

??

8:50 | 21. března

gfg

15:27 | 27. března

fff

15:27 | 27. března

Karta pacienta

1. Přidána evidence rodného čísla.
2. Přidáno generování čárového kódu dle zadaného rodného čísla.

Karta pacienta Doksanský Marek

Křestní jméno	Marek	
Příjmení	Doksanský	*
Skupiny pacientů	Žádná	
Datum narození	01.08.1991	
Rodné číslo	910801/0747	
Zobrazované jméno	Doksanský Marek	*
Poznámka	test 2 2 2 2 2	
MTBI	infj	
Pohlaví	☐ Nespecifikováno ☒ Muž ☐ Žena	
Uložit upraveného pacienta		
* Položky označené hvězdičkou jsou povinné.		


[Upravit](#)


1 091080 107474

3. Přidána možnost správy profilového obrázku.

Úprava obrázku



4. Úprava GUI pro zadávání hodnot měření.

Jméno přiřazeného zařízení	Používáno od	Používáno do
IntelliFlat 104001 MD	14. 8. 2015	Nestanoveno

Čas měření	Měřená veličina	Hodnota	Zdroj měření	Popis měření
4. 6. 2018 10:23	Body Height	54 cm	SiTest	
12. 3. 2018 15:32	Body Height	175,5 cm	SiTest	
7. 3. 2018 15:30	Body Weight	12 kg	SiTest	
21. 2. 2018 12:58	Body Height	175,5 cm	SiTest	
9. 2. 2016 12:16	Body Height	175 cm	Diani	

Čas měření

Měřená veličina

Hodnota

* Položky označené hvězdičkou jsou povinné.

Časová zóna

(UTC+01:00) Amsterdam, ... Zimní/letní čas je automaticky připočítáván

Seznam pacientů

1. Odstranění slideru MBTI.
2. Přidána možnost filtrování podle rodného čísla.

3. Změna GUI.

Seznam pacientů

Nový pacient

Nahraj soubor

Skupiny pacientů

Všechny

Hledej podle jména

Hledané jméno

Hledej podle RČ

Rodné číslo

Hledej

Zobrazované jméno	Datum narození	RČ	Pohlaví	Název skupiny	Parametry	Poznámka	Název zařízení	Používáno od	Používáno do	Akce
00 Zelinova Michaela	3. 2. 1966		Ž				IntelliFlat 104077	7. 2. 2019	7. 2. 2019	Nahraj soubor
aaa aaa aaaa		aaa	Ž				Phone 163	22. 2. 2018	-	Nahraj soubor
adfa asfdD qwdlqsfasf	29. 5. 2013	5235	M				Phone 165	18. 2. 2014	-	Nahraj soubor

Přidej nového pacienta

1. Možnost zadat rodné číslo.

Přidej nového pacienta

Křestní jméno

Příjmení

Skupiny pacientů

Žádná

Datum narození

Rodné číslo

Zobrazované jméno

Poznámka

Pohlaví

☒ Nespecifikováno ☐ Muž ☐ Žena

Přidej nového pacienta

* Položky označené hvězdičkou jsou povinné.

Seznam uživatelů

1. Změna GUI.

Seznam uživatelů

Nový uživatel

Hledej podle jména

Hledané jméno

Hledej

Uživatelské jméno	Zrušen	Emailová adresa	Poznámka	Datum registrace	Stav registrace	Role	Moduly	Akce
Hypertonic.60	Ne	holubann@gmail.com		26. 3. 2019 13:43	Schválena	Patient	 	Deaktivovat
Hypertonic.59	Ne	holubann@gmail.com		26. 3. 2019 13:42	Schválena	Patient	 	Deaktivovat
Hypertonic.58	Ne	holubann@gmail.com		26. 3. 2019 13:42	Schválena	Patient	 	Deaktivovat
Hypertonic.57	Ne	holubann@gmail.com		26. 3. 2019 13:41	Schválena	Patient	 	Deaktivovat
Hypertonic.56	Ne	holubann@gmail.com		26. 3. 2019 13:41	Schválena	Patient	 	Deaktivovat
Hypertonic.55	Ne	holubann@gmail.com		26. 3. 2019 13:40	Schválena	Patient	 	Deaktivovat

Přidat uživatele

1. Změna GUI v sekci role a moduly.

Roles and modules

Role	Moduly
☐ Admin	☐ Module Diabetes 
☐ Doctor	☐ Module Hypertension 
☐ Patient *	☐ Module Physical Activity 
☐ Researcher *	
☐ Student *	
☐ Study Participant *	

* Uživatel s touto rolí musí mít přiřazeného výchozího pacienta.

2. Přidána možnost při vytvoření nového uživatele rovnou schválit jeho registraci, informační email není odeslán. Tato možnost je před vybrána jako základní.

Registration process

Schválit registraci  ☒

(New) Seznam skupin (Nahradilo Vytvořit skupinu)

Menu -> Administrace -> Seznam skupin

1. Možnost vytvořit novou skupinu včetně přiřazení uživatelů kteří k ní mají mít přístup a pacientů, kteří do ní spadají.
2. Obsahuje seznam všech skupin s počtem přiřazených pacientů a uživatelů s přístupem.

Vytvořit novou skupinu

Název skupiny

Pacienti ve skupině

Uživatelé s přístupem ke skupině

Seznam skupin

Název skupiny	Počet pacientů	Počet uživatelů	Aktivní	
-all-	0	0	Ne	Upravit
Euro Cross CZ	18	4	Ano	Upravit
UnitTestClientGroup	0	0	Ano	Upravit
CleverTech	33	1	Ano	Upravit
Diani	63	4	Ano	Upravit
Diani2	2	3	Ano	Upravit

3. Jednotlivé skupiny ze seznamu je možné editovat (název skupiny, uživatelé, pacienti a zda je skupina aktivní / zrušená).

Upravit skupinu

Název skupiny

CleverTech

Pacienti ve skupině

Bykovskaia karina, Caihaml Vít, Caihamlová Anna, David Doktr ▾

Uživatelé s přístupem ke skupině

dominik.fiala ▾

Aktivní

☒

<< Zpět

Uložit

(New) Role a oprávnění

Menu -> Administrace -> Role a oprávnění

1. Zobrazení tabulky znázorňující role a jím přidělená oprávnění.

Role a oprávnění

	Patient	Doctor	Admin	Student	Researcher	StudyParticipant	ModuleDiabetes	ModuleHypertension	ModulePhysicalActivity
None	Ne	Ne	Ano	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne
Clients_Read	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ne	Ne	Ne	Ne
Clients_Write	Ne	Ano	Ano	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne
Boxes_Read	Ne	Ne	Ano	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne
Boxes_Write	Ne	Ne	Ano	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne
BoxAssignments_Read	Ne	Ano	Ano	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne
BoxAssignments_Write	Ne	Ano	Ano	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne
Alarms_Read	Ne	Ne	Ano	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne
Alarms_Write	Ne	Ne	Ano	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne
ActivityLog_Read	Ne	Ne	Ano	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne
Signals_Read	Ne	Ne	Ano	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne
Locations_Read	Ne	Ne	Ano	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne

Obecné

1. Ukládání vybraných datumů do paměti.
 - Vybrané datumy se nově ukládají do paměti a po přechodu na jinou stránku se automaticky předvyplní.
 - U grafů se určuje nejblíží předdefinovaný časový interval (den, týden, měsíc). Pokud se například v diabetickém deníku vybere časový interval 20 dní, v grafech se zobrazí jako měsíční náhled s počátečním datem původního výběru.
2. Změna loga

Diani

Diani